

PORODO
LiveOn



Porodo Live On

جهاز استنشاق محمول

SKU: PDN3WH

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	قبل الاستخدام الأول
٤	مكونات المنتج
٥	تعليمات التشغيل
٦	تحذيرات البطارية
٦	فك الجهاز
٦	إضافة سائل
٧	طريقة التركيب
٧	تعليمات الاستخدام
٨	إيقاف التشغيل
٨	التنظيف والصيانة
٨	التعقيم
٩	تعليمات السلامة
١٠	محتويات العبوة
١٠	التخلص من الجهاز
١١	الضمان
١١	اتصل بنا

جهاز Porodo Live On المحمول للتبخير هو جهاز قابل لإعادة الشحن، صغير الحجم، وفعال، مصمم لتوصيل جزيئات دقيقة لإيصال الدواء بفعالية. تتيح لك خاصية التبخير القابلة للتعديل تخصيص كثافة الرذاذ لتجربة مريحة، بينما يضمن التصميم المانع للتسرب والارتداد استخدامًا آمنًا وموثوقًا. يُعد هذا الجهاز مثاليًا للاستخدامات الطبية، ويعمل بهدوء، مما يجعله مناسبًا للاستخدام المنزلي وأثناء التنقل. بفضل كوب الدواء القابل للفصل، يمكنك ملء الحاوية بالسائل المطلوب بسهولة وتركيبها بكل يسر. يوفر الجهاز مرونة في الاستخدام مع قطعة الفم أو قناع الوجه، ويبدأ التبخير بعملية بسيطة، مما يضمن علاجًا فعالًا وهادئًا.


المواصفات

سعة البطارية	٤٠٠ مللي أمبير/ساعة
الجهد المقنن	٣,٧ فولت
التردد الاسمي	١٠٨ كيلوهرتز
التيار المقنن	٣٠٠ مللي أمبير
حجم الجسيمات (مم هضبة هوائية)	٤ ميكرومتر
مدة التشغيل	٦٠ دقيقة
مدة الشحن	٩٠ دقيقة
معدل التبخر	≤٠,٢ مل/دقيقة

سعة السائل المتبقي	≥ ٠.٥ مل
مستوى الضوضاء	≥ ٥٠ ديسيبل (أ)
درجة حرارة التشغيل	من ٥ إلى ٤٠ درجة مئوية
نطاق الضغط	من ٨٦ إلى ١٠٦ كيلوباسكال
مستوى مقاومة الماء	IPX٣
وزن المنتج	٩٦ غرام (بدون بطارية)
حجم المنتج	١٢٥ × ٦١ × ٤٧ ملم
رقم الموديل	PDN٣


قبل الاستخدام الأول

١. عند انخفاض درجة حرارة التخزين عن ٥ درجات مئوية، يجب إعادة الجهاز إلى ظروف التشغيل العادية قبل الاستخدام.
٢. قبل تركيب المنتج واختباره، يرجى التأكد من تطابق مظهر المنتج وعدد الملحقات مع القائمة الواردة في دليل المستخدم.

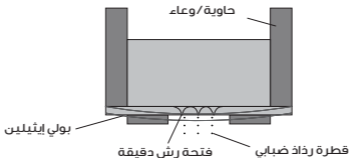




تعليمات التشغيل

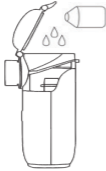

١. حقن السائل في عبوة الدواء.

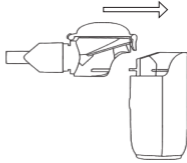


٢. تركيب عبوة الدواء.



٣. تركيب قناع الوجه أو قطعة الفم.



٤. بدء عملية رش الدواء.

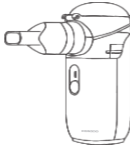


٥. استخدام القناع أو قطعة الفم للعلاج.

تحذيرات البطارية

١. لا تستخدم بطاريات غير متوافقة.
٢. عندما يكون ضوء المؤشر أحمر، فهذا يعني أن البطارية فارغة، وسيتوقف الجهاز تلقائيًا بعد ه ومضات متواصلة.
٣. لا تُدخل البطارية في الجهاز عند عدم استخدامه البخاخ.

التفكيك

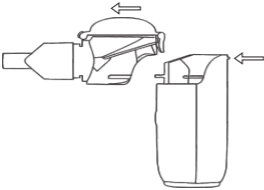


اضغط على زر التشغيل الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز، ثم ادفع كوب الدواء باتجاه الجزء الأمامي من الجهاز، وأخرجه.

ملاحظات:


١. تأكد من الضغط على زر التشغيل عند إخراج الكوب لتجنب تلف الجهاز.
٢. لا تُدخل أي شيء في فتحة الرش أو تلمس البخاخ لتجنب تلف الجهاز.

إضافة السائل

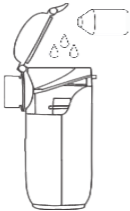

١. لا تستخدم بطاريات غير متوافقة.
٢. عندما يكون ضوء المؤشر أحمر، فهذا يعني أن البطارية فارغة، وسيتوقف الجهاز تلقائيًا بعد ه ومضات متواصلة.
٣. لا تُدخل البطارية في الجهاز عند عدم استخدامه.


طريقة التجميع

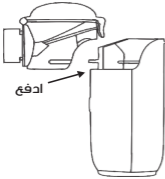

ستسمع صوت "beep" خفيف، مما يشير إلى تثبيت المشبك بإحكام عند إعادة تجميع الجهاز. بعد ذلك، تأكد من أن القطب الكهربائي موصول جيدًا ويمكنه الرش بشكل طبيعي.

تعليمات الاستخدام

1. الضغطة الأولى على زر التشغيل تُشغّل جهاز التبخير برذاذ قوي.
2. الضغطة الثانية تُشغّل رذاذًا عاديًا، والضغطة الثالثة تُشغّل رذاذًا خفيفًا، والضغطة الرابعة تُوقف التبخير.
3. عندما يوشك السائل على النفاد، يُنصح بإمالة الجزء الأمامي من جهاز التبخير قليلًا باتجاه الجهاز لتسهيل تبخير السائل المتبقي الملامس للرذاذ.
4. بعد الضغط على الزر، سيبدأ جهاز التبخير بالعمل خلال ثانيتين.
5. عند استخدام القناع للاستنشاق، لا تُغَطِّ فتحات التهوية بيدك أو بأي شيء آخر.
6. عند استنشاق الرذاذ، أمسك جهاز التبخير برفق بيدك. لا تُغَطِّ فتحة التهوية الموجودة على غطاء الكوب بيدك أو بأي شيء آخر، فقد يؤثر ذلك على عملية التبخير.
7. إذا شعر المستخدم بأي انزعاج أثناء الاستخدام، يرجى إيقاف تشغيل الجهاز على الفور واستشارة الطبيب على وجه السرعة.

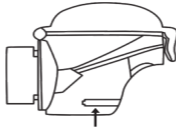

قد يبقى السائل هنا

إذا كنت ترغب في إيقاف استخدام الجهاز أثناء التشغيل، فأوقف تشغيله بالضغط على زر التشغيل. سينطفئ مؤشر البخاخ الأزرق.

التنظيف والصيانة

1. انزع قطعة الفم أو القناع من الكوب، وافتح غطاء الكوب، ووصف أي سائل متبقٍ. أضف كمية قليلة (٥-٢ مل) من الماء النقي إلى الكوب وأغلق الغطاء. رجّ الكوب برفق لإذابة أي بقايا.
2. افتح الغطاء واسكب المحلول، ثم أعد ملء الكوب بكمية قليلة (٥-٢ مل) من الماء النقي.
3. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل حتى يومض ضوء المؤشر باللون الأزرق. سيدخل جهاز التبخير في وضع التنظيف، حيث سيتم رش الماء النقي لتنظيف أي بقايا متبقية من فتحة الرش.
4. بالنسبة للوحدة الرئيسية، استخدم قطعة شاش مبللة لمسح البقع برفق، ثم جففها بقطعة شاش نظيفة.
5. أخيرًا، نظّف الأقطاب الكهربائية على كل من الوحدة الرئيسية والكوب لضمان التوصيل السليم بين الكوب والجهاز.

التعقيم

- أ. احرص على تعقيم أجزاء جهاز الاستنشاق (قطعة الفم والقناع) بعد كل استخدام. في حال تلوث أي جزء بشدة، استبدله فورًا. هناك طريقتان موصى بهما للتعقيم:
- ب. التعقيم بالكحول: عقم أجزاء جهاز الاستنشاق باستخدام كحول طبي بتركيز ٧٥٪.
- ج. التعقيم بمحلول حمض الخليك: عقم أجزاء جهاز الاستنشاق بمزج جزء واحد من الخل الأبيض مع ثلاثة أجزاء متساوية من الماء النقي لتحضير محلول حمض خليك مخفف.

ملاحظات:

1. لا تمسح جهاز التبخير الشبكي بسوائل متطايرة مثل البنزين أو مخفف الطلاء.

٢. لا تستخدم أعواد القطن أو أي أدوات أخرى للمس الأقطاب الكهربائية في الوحدة الرئيسية أو وحدة كوب الدواء، فقد يؤدي ذلك إلى ارتخائها أو سقوطها.
٣. أزل البطارية قبل تنظيف أي جزء.
٤. تأكد دائمًا من إزالة البطارية قبل التنظيف.
٥. كوب الدواء جزء استهلاكي وغير مشمول بالضمان. في الظروف العادية، يبلغ عمره الافتراضي حوالي ستة أشهر (بناءً على استخدامه ثلاث مرات يوميًا في درجة حرارة الغرفة العادية أو لمدة ٣٠ دقيقة تقريبًا يوميًا). قد يختلف العمر الافتراضي الفعلي حسب الدواء المستخدم.
٦. إذا كان من الصعب إزالة السائل المتبقي، اشطف الكوب بالماء الدافئ أو كرر عملية الغسل حسب الحاجة.
٧. نظف كوب الدواء بعد كل استخدام لمنع انسداد فتحة رذاذ البخاخ وللحفاظ على عملية التبخير السليمة.
٨. وضع التنظيف مخصص فقط لتنظيف البخاخ بعد الاستخدام، ويجب عدم استخدامه لتبخير السوائل العادية.

تعليمات السلامة

١. بعد التعقيم، اشطف الجهاز جيدًا بالماء النقي لإزالة أي بقايا كحول أو حمض الخليك.
٢. تجنب إسقاط الوحدة الرئيسية أو وحدة كوب الدواء، وتجنب تعريضهما للصدمات القوية.
٣. لا تدخل الإبر أو أي أجسام حادة أخرى في جهاز الاستنشاق.
٤. لا تعرّض الوحدة الرئيسية أو أي مكونات أخرى للحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة أو لأشعة الشمس المباشرة.
٥. لا تقم بتوصيل أو فصل محول الطاقة بأيدي مبللة.
٦. يجب شراء هذا المنتج واستخدامه تحت إشراف طبيب.
٧. عند تخزين جهاز الاستنشاق أو استخدامه، احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية. يُسمح بالاستخدام فقط تحت إشراف الكبار.
٨. يمكن استخدام جهاز الاستنشاق من قبل عدة أشخاص؛ ومع ذلك، يجب تخصيص الملحقات التي تلامس الجسم مباشرة (مثل الأقنعة وقطع الفم) لمستخدم واحد فقط لمنع انتقال العدوى. في حال استخدام عدة أشخاص للوحدة الرئيسية، يجب تخزين ملحقات كل مستخدم على حدة.

٩. لا تقم بتفكيك الوحدة الرئيسية أو محاولة إصلاحها بنفسك.
١٠. لا تخزن جهاز الاستنشاق إذا كان هناك دواء أو ماء متبقي في كوب الدواء.

محتويات العبوة

- الوحدة الرئيسية عدد ١
وحدة كوب الدواء عدد ١
قطعة الفم عدد ١
قناع عدد ٢

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)