

احتياطات السلامة

يرجى قراءة وفهم جميع التعليمات قبل الاستخدام ومتابعتها أثناء الاستخدام. لا تستخدم المنتج إذا كنت تعاني من أعراض شديدة في العين، أو خضعت لعملية جراحية في العين، أو كنت تعاني من حالات خطيرة في العين مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين وانقصال الشبكية.

– تنظيف المنتج بالقطن المنقوع بالكحول. لا تستخدم الماء. – لا تقم بتفكيك المنتج بنفسك. – اتبته إلى أن سطح المنتج قد يصبح ساخناً أثناء الاستخدام، خاصة إذا كنت غير حساس للحرارة.

– هذا المنتج غير مناسب للأشخاص الضعفاء جسدياً، أو الذين يعانون من بطء الاستجابة، أو الذين يعانون من اضطرابات عقلية، إلا إذا كانوا تحت توجيه أو مساعدة أولياء أمورهم. المنتج غير مصمم للأطفال والأفراد ذوي الإعاقة لاستخدامهم بمفردهم. احفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.

– هذا المنتج عبارة عن مدلك مخصص للعناية الصحية الشخصية ولا يمكن أن يحل محل آثار الأدوية والأجهزة الطبية. – لا تقم بتفكيك أو سحق أو ضغط بطارية الليثيوم الموجودة في المنتج، ولا تعرضها للنار. توقف عن استخدام المنتج إذا انتفخت البطارية بشكل ملحوظ.

– لا تستخدم البطارية إذا كانت مشبعة بالماء. – تجنب وضع المنتج في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة، لأنه يحتوي على بطارية الليثيوم.

– إذا كنت تعاني من حساسية الجلد، أو التهاب الجلد التحسسي في الوجه، أو رد فعل تجاه المواد البلاستيكية، استشر الطبيب قبل استخدام المنتج على وجهك. – قم بإزالة العدسات اللاصقة ودبابيس الشعر وإكسسوارات الشعر قبل الاستخدام.

تعليمات

– تجنب استخدام المنتج في الأماكن الحارة والرطبة. – تجنب التعرض لأشعة الشمس القوية والغازات التي يمكن أن تسبب التآكل. – لا تستخدم المنتج أثناء المشي أو القيادة لأنه يعيق الرؤية. – قم بشحن المنتج باستخدام شاحن الهاتف المحمول بقدرة 5 فولت/ ١ أمبير. – ابق عينيك مغلقين أثناء استخدام المنتج. – تجنب استخدام الأشياء الحادة التي قد تخدش المنتج أو تثقبه.

هيكل المنتج



C منفذ الشحن من نوع

خصائص المنتج

- ضبط ذكي للضغط
- يمكن طيها بزاوية 180 درجة لتوفير مساحة تخزين مدمجة
- وظيفة تشغيل الموسيقى
- قدرة تطبيق الضغط الحار
- مادة جلدية صديقة للبشرة
- ميزة البث الصوتي

قبل الاستعمال

١. قم بشحن البطارية بالكامل باستخدام شاحن الهاتف المحمول 5 فولت ٢. استخدم قابس U8 لتوصيل شاحن الهاتف المحمول بكابل USB. ٣. قم بتوصيل قابس USB صغير من الجهاز الرئيسي بشاحن الهاتف المحمول لبدء الشحن. ٤. سيومض مؤشر البطارية أثناء الشحن ويظل مضاءً عند اكتمال الشحن. ٥. لن يعمل الجهاز أثناء الشحن وسيتم إيقاف تشغيله إذا بدأ الشحن أثناء الاستخدام.

طرق الاستخدام

* الافتراضي: وضع حماية العين: ضغط الهواء + الضغط الساخن + الموسيقى (عشر دقائق). – اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. – اضغط على زر الطاقة للتنقل بين الأوضاع. – اضغط مرتين على زر الطاقة لتمكين كتم الصوت. *وضع الحلقة بلمسة واحدة: يبعث الصوت الوضع الحالي بعد الضغط على زر الوضع. *المدة: يكون كل وضع نشطاً لمدة عشر دقائق بشكل افتراضي، مع إيقاف التشغيل التلقائي بعد ذلك. *حماية العين: ضغط الهواء + الضغط الساخن + الموسيقى *جمال العين: ضغط الهواء + الضغط الساخن + الموسيقى *تهديئة: ضغط الهواء + الموسيقى *نوم لطيف: ضغط الهواء *الضغط الساخن: الضغط الساخن + الموسيقى

المعلومات الفنية

اسم المنتج	مدلك العينين القابل لإعادة الشحن مع تقنية التسخين وموسيقى البلوتوث
وضع التحكم	عملية بزر واحد
وضع التدليك	خمسة أنواع
وقت التدليك	إدقائق في الجلسة (إيقاف تلقائي)
تصنيف الطاقة	5واط أو أقل
حجم المنتج	112.5 ملم × 90 × 221
بطارية مدمجة	1200 مللي أمبير
وسادة هوائية/ ضغط ساخن/ موسيقى	C-نوع
1 أمبير/ 5 فولت	297 جرام

المواد الضارة في المنتجات

اسم الجزء	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	الكروم السداسي القابل للتحويل (Cr(VI))	البوليبروميثات البيفينيلية (PBB)	إيثربوليبروميثات البيفينيلية (PBDE)
الأجزاء البلاستيكية	○	○	○	○	○	○
اللوحة الدائرية	×	○	○	○	○	○
التحكم في الضغط المكون	○	○	○	○	○	○
حزمة البطارية	×	○	○	○	○	○
الحزمة	○	○	○	○	○	○
المرفقات	○	○	○	○	○	○
0:محتوى المادة الخطرة في جميع المواد المتجانسة للمكون أقل من الحد المطلوب وفقاً للمواصفة 26572 GB/T.						
x:محتوى المادة الخطرة في مادة واحدة متجانسة على الأقل من المكون يتجاوز الحد المطلوب وفقاً للمواصفة 26572 GB/T.						

التنظيف والتخزين

* قم بإيقاف تشغيل الطاقة قبل التنظيف. قم بتنظيف سطح المنتج بقطعة قماش ناعمة وجافة. * عند عدم الاستخدام لفترات طويلة، قم بتغطية المنتج بواقي من الغبار (غير متوفر).

انتباه

قبل التنظيف، افصل مصدر الطاقة. تجنب استخدام المنظفات المسببة للتآكل مثل البنزين أو المواد المخففة، والتي قد تسبب تغير اللون أو تلف هيكل المنتج. لا تعرض المنتج لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة لمنع الضرر.

مشكلات شائعة والحلول


المشكلات	الأسباب المحتملة	الحلول المقترحة
1	أصوات مثل "وو" و "دا".	أصوات عمل طبيعية من الضخ الذي يعيق/يفرغ الهواء، والمحرك الذي يدبر، والتآكل بين غطاء الملابس، إلخ.
2	إيقاف تلقائي بعد التشغيل	البطارية الليثيوم منخفضة، اشحن البطارية.
3	زر التشغيل لا يعمل.	قد يكون الشاحن معطل، ربما يكون الشاحن مكسوراً، اشحن البطارية
4	ضغط الهواء منخفض جداً.	البطارية الليثيوم منخفضة، اشحن البطارية.

*إذا استمرت المشكلات بعد هذه الحلول، فأوقف تشغيل المنتج واتصل بالموزع أو الشركة. *الشركة ليست مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر نتيجة للإصلاح أو التفكيك غير المصرح به

خدمات الشحن

* لا يتم تغطية الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير السليم أو التخزين من قبل المستخدم. * لا يتم تغطية الأضرار الناجمة عن مناهذ الخدمة غير المعينة من قبل الشركة. * لا يتم تغطية المنتجات خارج فترة الضمان.

مخطط إزالة البطارية

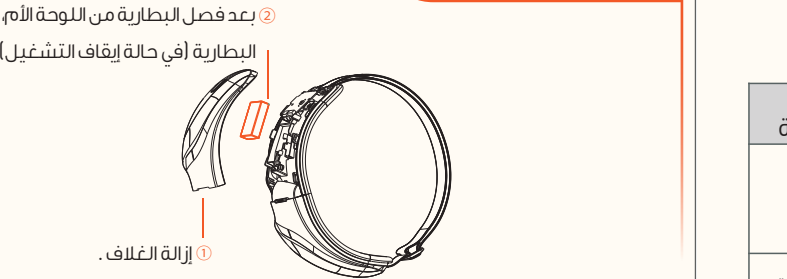

التخلص

١. قم بإزالة البطارية قبل التخلص من المنتج. ٢. قم بفصل مصدر الطاقة قبل إزالة البطارية. ٣. لا تقم بتبديل البطارية دون الحصول على إذن. ٤. استخدم الأدوات المناسبة لإزالة الغطاء العلوي للمنتج، ثم قم بإزالة البطارية والتخلص منها في مرافق إعادة التدوير المناسبة.

النقل والتخزين

– درجة الحرارة المحيطة: من -40 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية. – الرطوبة النسبية: أقل من 80% مع توفير تهوية جيدة. تجنب الغازات التآكلية. – المنتج مناسب للنقل جويًا وبريًا وبحريًا وبواسطة السكك الحديدية. يجب ألا يتعرض للمطر أو الثلج، ولا ينبغي تخزينه بوضع مقلوب أو مطحون.

– إذا تم تخزين المنتج لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، قم بفحص المنتج وتشغيله لمدة نصف ساعة قبل الاستخدام.

ضمان

الاستبعاد

– لا يغطي برودو أي ضرر ناتج عن الاستخدام العادي للمنتج مع مرور الوقت خلال فترة الضمان. – لا يشمل ضمان برودو تغطية الاستخدام غير السليم أو الضرر المتعمد أو الحوادث أو السرقة أو الإهمال أو أي إصلاحات تتم بواسطة مراكز خدمة غير معتمدة.

– يتم ذكر احتياجات الطاقة لكل منتج بوضوح على العبوات الخاصة به. يرجى التحقق من هذه المتطلبات مقابل تلك الخاصة ببلدك قبل الشراء. لن يكون برودو مسؤولاً عن أي مشاكل متعلقة بهذا. لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من: porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، من فضلك اتصل بنا على info@porodo.net موقع الكتروني: www.porodo.net دعم الخدمة: support@porodo.net استقراوم: [porodo](http://porodo.net)